

Reconditionnement hygiénique

HEINE mini-c, HEINE mini-e,

HEINE mini 3000® Cliplamp,

HEINE mini 3000® Combi Lamp

Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



AVERTISSEMENT ! Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés.



REMARQUE ! Ce symbole est utilisé pour des informations. Il est important mais ne renvoie pas à un danger.

	<p>Les instructions relatives au reconditionnement hygiénique doivent être respectées sur la base des normes, lois et directives nationales.</p> <p>Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur de votre institution/département.</p>
	<p>En cas de soupçons de contamination, procéder à un traitement hygiénique.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions.</p> <p>Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par des personnes possédant d'expertise hygiénique adéquate.</p> <p>Veillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué.</p> <p>Éviter la pénétration de liquides dans le dispositif.</p> <p>Le produit ne peut être stérilisé.</p> <p>Abaisse-langue à usage unique HEINE sont prévus exclusivement à un usage unique. Une utilisation répétée peut présenter un risque de détérioration du produit ainsi qu'un risque d'infection.</p>
<p>Limitations en matière de reconditionnement</p>	<p>Contrôler à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil.</p>



Désinfection par essuyage

1. Préparation

Retirez l'abaisse-langue (s'il y a lieu) et jetez-le.

Éteindre le dispositif et le laisser refroidir.

2. Nettoyage et désinfection manuelle



Veillez à humidifier entièrement toutes les surfaces contaminées avec le produit désinfectant pendant le temps d'action total préconisé par le fabricant. Si nécessaire, augmenter le nombre de procédures d'essuyage et/ou le nombre d'essuyages.

Équipement

- Produit de désinfection : alcoolique (p. ex. Incides N ou mikrozid universal wipes) ou alcoolique + d'ammonium quaternaire (p. ex. Super Sani-Cloth)
- Si vous utilisez des agents de reconditionnement autres que ceux recommandés, assurez-vous qu'ils ne soient pas moussants.

Mise en œuvre

- Nettoyer et désinfecter le dispositif manuellement.
- Faire tout particulièrement attention aux zones difficiles d'accès.
- Essuyer bien les surfaces que vous touchez.
- Pour éliminer le désinfectant et procéder ensuite au séchage, suivre les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.

3. Inspection et test de fonctionnement



- Inspecter l'appareil à la recherche de contaminants. Procéder à un nouveau reconditionnement si nécessaire.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

4. Stockage

La stocker de sorte à la protéger contre toute recontamination, de la poussière et de l'humidité.

